

Sulcustágítás

# 3M ESPE Retrakciós Paszta



Gyors és egyszerű — egy egészen  
újszerű sulcustágítás

**ÚJ!**

Poliéter és A szilikon  
lenyomatanyagokhoz  
fejlesztve



**3M** ESPE

# Az első retrakciós kapszulával a sulcustágítás egyszerűvé vált



A 3M ESPE 45 éve iránymutató a fogászati lenyomatanyagok piacán.

Legyen szó a Monophase poliéter vagy az Express XT lenyomatanyagról, napjainkban a lenyomatvétel elképzelhetetlen a 3M újításai nélkül. Az innovatív Retrakciós kapszula újabb mérföldkövet jelent ezen az úton: a sulcustágítás egyszerű és hatékony módját.

A kapszula vékony csőrének köszönhetően a sulcustágító anyag könnyen juttatható oda ahová szükséges: az ínbarázda mélyére.

## Indikációk

3M ESPE Retrakciós Paszta alkalmas a marginális gingiva ideiglenes tágítására, száraz sulcust biztosít egészséges íny esetén

- lenyomatvételkor
- ideiglenes pótlás készítésekor
- II és V osztályú tömések preparálásakor

A terméket tilos parodontális betegségben szenvedőkön, furcatio érintettség, valamint csont expozíció esetén használni.



## A termék jellemzői, előnyei

### Általános előnyök

- Tiszta, száraz sulcust biztosít, hosszantartó vérzéscsillapító hatással
- Hatékonyan tágítja a sulcust



### A fonállal szemben

- Egyszerű és gyors sulcustágítás: kétszer gyorsabb
- Ritkább utóvérzés a lenyomat eltávolítása után
- Gyengéd a szövetekhez, a páciensek nagyobb kényelméért



A 3M ESPE Retrakciós Paszta alkalmazása

### A konkurens pasztákkal ellentétben

- Könnyebb a sulcusba juttatni az approximális területeken is, köszönhetően a vékony csőrnek
- A higiénikusabb kiszerelés segít megelőzni a fertőzések átvitelét
- A legtöbb kompozit kapszulakinyomóval használható

# Hogyan használjuk a 3M ESPE Retrakciós Pasztát?

Lépésről lépésre a tiszta és száraz munkaterületért

1



Távolítsuk el a kapszulát a csomagolásból és helyezzük az adagolóba (csaknem valamennyi kompozit kapszulakinyomóval kompatibilis). Használat előtt nyomjunk ki egy keveset és ezt dobjuk ki.

2




Vezessük a kapszula csőrét az ínnyarázdába. A sulcust ezzel mechanikusan megnyitjuk.

3



Lassan, egyenletesen fecskendezzük a sulcuscstágitót az ínnyarázdába, amíg teljesen fel nem töltöttük.

4

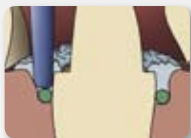

#### OPCIONÁLISAN

Az anyagot használhatjuk sulcuscstágitó fonállal kombinálva is.

5



Hagyjuk a pasztát legalább 2 percig a sulcusban.

6



A pasztát levegő - víz-spray és szívás segítségével maradéktalanul távolítsuk el.



A klinikai felhasználás részleteiért  
tekintse meg honlapunkat!

# 3M ESPE Retrakciós Paszta

**Könnyen juttatható a sulcusba**

Puha végű csőr

Hosszú, vékony kapszula-csúcs, jelölőgyűrűvel

A jelölőgyűrű a parodontális szondán lévő jelzésnek megfelelő helyen van. Ezzel segíti a még pontosabb és könnyebb intraorális használatot

**A magas viszkozitású anyag egyszerűen kinyomható**

Optimális kialakítású belső forma

**Higiénikus és tiszta használatot biztosító kiserelési egység**

**Biztonságos rögzülés a legelterjedtebb kapszulakinyomókban**

Abronszhatás

*"A 3M ESPE Retrakciós Paszta egyszerű és gyors megoldást nyújt a bonyolult esetekre is"* Dr. Molnár Bertold, Budapest

## Rendelési információk

Termék kód	Termékinformáció
56944	3M ESPE Retrakciós Paszta utántöltő 25 kapszula
56945	3M ESPE Retrakciós Paszta utántöltő 100 kapszula

**3M ESPE**

3M Hungária Kft.  
1138 Budapest,  
Váci út 140.  
Tel.: 06-1-270-7777  
www.3mespe.hu

